


INSPIRATION
easy.

Ceramica

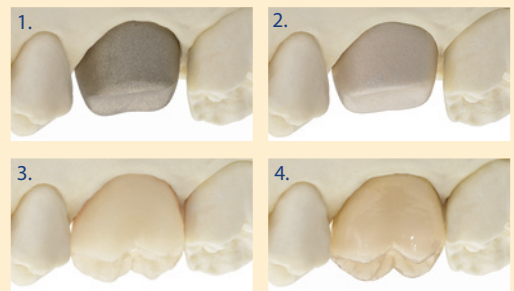

Con questa innovativa vetroceramica a base di disilicato di litio stratificare risulta ancora più semplice:

1. Struttura in metallo
2. Opaco Inspiration colorato
3. INSPIRATIO Neasy Body
4. INSPIRATIO Neasy Shade Body, pittura incisale, Glasur finale

I risultati ottenuti sono corone singole e ponti perfettamente naturali.

INSPIRATIO Neasy è adatta a tutte le lehe per ceramica con un coeff. $WAK_{500^{\circ}C}$ 13,8 – 14,8. E' ottimale per le leghe prezione e e non di ITALOR.

ISTRUZIONI D'USO

Materiale e Indicazioni

INSPIRATION easy è una vetroceramica a due fasi a base di disilicato di litio per stratificare le leghe tradizionali e leghe vili con un coefficiente CET (500 °C) da 13,8 – 14,8 µm/mK.

Con le leghe nobili richiede un raffreddamento lento .
Per i metalli non nobili rivolgersi al proprio fornitore.

Tramite le diverse combinazioni di tre masse corpo e shade, e con la pittura incisale, si riesce a realizzare completamente il di colore vita classico da A1 a D4.

Preparazione del Modello

Modellare, fondere, rifinire e ossidare adeguatamente secondo le indicazioni del produttore di leghe.

Opaco

Le paste opache dell' assortimento INSPIRATION sono confezionate in vasetti pronte all'uso. Quando la pasta si deposita si può semplicemente mescolare per ripristinare la consistenza originale.

Applicare il primo strato sulla struttura metallica ben pulita con un pennello e leggermente inumidito con il liquido opaco (eliminando eccessi), in modo da coprire il metallo per il 70%.

1. Cottura (Wash):

Posizionare il manufatto sul portaoggetti e far asciugare con il forno aperto per 6 – 8 Min.

Chiudere il forno (Temperatura base 400 °C)

Salita di 80 °C/Min. fino a 900 °C ; con vuoto da 450 °C

Tempo di tenuta 1 Min. senza vuoto

Applicare il secondo strato di opaco coprente.

2. Cottura:

La seconda cottura deve essere effettuata come la prima.

1. Cottura:

Posizionare il manufatto sul portaoggetti e far asciugare con il forno aperto per 6 min.

Chiudere il forno (Temperatura base 400 °C)

Salita di 60 °C/Min. fino a 880 °C con vuoto da 450 °C

Tempo di tenuta 1 min. senza vuoto

Rifinire il restauro estetico dopo la prima cottura ed applicare la massa corpo secondo il programma Inspiration easy

2. Cottura:

Ripetere come la prima ma con una temperatura di 870 °C

Cottura Glasur

Dopo la cottura e una pulizia accurata , applicare uno strato sottile di pasta Glasur, di colore pittura "incisal" , e una delle quattro colorazioni shade body.

Si può correggere il colore desiderato con il colore di pittura incisal e i colori shade body A , B , C , D .

Cottura Con Glasur:

Posizionare il manufatto sul portaoggetti e far asciugare con il forno aperto per 4 min.

Chiudere il forno (Temperatura base 400 °C)

Salita di 60 °C/Min. fino 810 – 820 °C senza vuoto

Tempo di tenuta 1 min senza vuoto

Cottura senza Glasur:

Per la cottura ripetere come sopra ma con una temperatura di 830 – 840 °C

Cottura Body

Ceramica in polvere (corpo 1,2,3) con liquido per modellazione N Impastare fino a ottenere una consistenza cremosa e stratificare la forma anatomica del dente. Condensare gli strati con una leggera vibrazione.



Attenzione:
Rischio per la salute respirando la polvere di ceramica.

Tabella Combinazioni

Colore	A0	A1	A2	A3	A3,5	A4	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Body	1	1	2	3	3	3	1	1	2	3	3	1	3	3	3	1	2	2
Shade Body		A	A	A	A	A		B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D
Pittura Shade Body		1x	1x	1x	2x	2x		1x	1x	2x	2x	1x	1x	1x	1-2x	1x	1x	1x
Pittura Incisale	Necessario per ogni colore. Effetto trasparenza.																	

VITA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA® -Zahnfabrik, Bad Säckingen.